

PULPDENT

Forendo Paste

Kalsiumhydroksidi, joka sisältää iodoformia

- Bakteereja tappava
- Bakteerien kasvua estävä
- Radiopaakki
- pH yli12

TUOTEKUVAUS

Forendo Patea voidaan käyttää väliaikaisena tai pysyvänä endodonttisena täytemateriaalina. Se nopeuttaa paranemista ja estää bakteerikasvua juurikanavassa. Forendo Patea suositellaan käytettäväksi desinfioivana täyteaineena juurikanavassa vastaanottokäyntien välillä. Se ehkäisee tulehduksia ja sopii tulehtuneiden juurikanavien, abskessien, periapikaalisten leesioiden, perforointien, kudostestien tihkumisen, juuren resorption, tapaturmavammojen, apeksifikaation ja apeksogenesiksen hoitoon.

Forendo Patea voidaan käyttää yksistään väliaikaiseen juurikanavan desinfiointiin tai yhdessä guttaperkan kanssa pysyviin täytteisiin sekä maitohampaiden pulpektomiaan.

Forendo Paste on kovettumaton, valmiiksi sekoitettu pasta, joka sisältää kalsiumhydroksidia ja iodoformia silikoniöljypohjassa. Sen pH on yli 12 ja materiaali on röntgensäteitä läpäisemätön.

KÄYTTÖOHJE

Väliaikainen juurikanavan hoito

1. Endodonttisissa toimenpiteissä puhdista ja esikäsitle juurikanava tavanomaisesti. Kuivaa juurikanava.
2. Aseta uusi kertakäyttöinen vientikärki kiinni Luer Lock -ruiskuun.
3. Täytä juurikanava painamalla kevyesti ruiskun mäntää. Älä paina mäntää voimakkaasti. Pasta voidaan asettaa juurikanavaan myös lentulalla.
4. Poista ylijäämät kanavan suuaukoilta steriilillä vanupallolla.
5. Sulje täyttöaukko haluamallasi sementillä.
6. Hävitä vientikärki ja laita ruiskun korkki paikoilleen heti käytön jälkeen.
7. Forendo Paste irtaoo helposti kanavasta viilalla ja huuhtelemalla natriumhypokloriitilla.

Pysyvä juurikanavan täyttö

1. Levitä pieni määrä Forendo Pastea apeksiin niin, että se varmasti umpeutuu. Forendo Paste toimii myös desinfiointiaineena estämällä bakteerien kasvun.
2. Levitä tavanomaiseen tapaan juurikanavasealeri tai juurikanavasealeri ja guttaperkka.

Maitohampaiden hoito

1. Seuraa yllä esiteltyjä väliaikaisen juurikanavahoidon ohjeita.
2. Forendo Pastea ei tarvitse poistaa juurikanavasta. Materiaali imeytyy maitohampaiden juuriin.

VARASTOINTI JA KÄSITTELY

- Kun annostelet ainetta ruiskusta, älä paina mäntää voimakkaasti. Käytä vain kevyttä painetta. Jos materiaali ei tule ulos, poista neula, puhdista ruiskusta ylijäämät ja aseta uusi neula ruiskuun.
- Säilytä tiiviisti suljettu alkuperäispakkaus viileässä huonelämpötilassa. Vältä suoraa valoa, lämpötilanvaihteluja, kontaminaatiota ja syttymisvaaraa.
- Avaamattoman tuotteen käyttöaika on 2 vuotta valmistuspäivämäärästä.
- Sulje ruisku heti käytön jälkeen.

VAROITUS

Tuote on tarkoitettu vain hammaslääkäreille ammattikäyttöön. Käytä suojalaseja ja -hanskoja. Vältä aineen joutumista silmiin, limakalvoille ja iholle. Jos ainetta joutuu limakalvoille tai silmiin, huuhtelee runsaalla vedellä. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee runsaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

PULPDENT Corporation

80 Oakland Street, Watertown, MA 02471-0780, USA

Tel: (800) 343-4342 / (617) 926-6666

Fax: (617) 926-6262

email: pulpdent@pulpdent.com

www.pulpdent.com

CE0459