

roeko

Gelatamp

Käyttöohje

FI

Ominaisuudet:

Gelatamp on hemostaattisesti vaikuttava 5 %:nen hopeakolloidi-gelatiinisieni. Se mahdollistaa optimaalisen haavanhoidon leikkauksen jälkeen, ja pienempiin leikkaushaavoihin sen voi muotoilla täsmälleen tarvittavan kokoiseksi. Tasaisen huokoinen sieni imee moninkertaisesti oman painonsa verta, edistää suuren pinta-alansa johdosta trombosyytiaggregaatiota ja täyttää haavakuopan. Syntynyt tukirakenne pysyy koossaan, kiinnittyy tiiviisti ympäristön seinämiin ja stabilisoi verihyytymän. Tämä estää halkioiden ja sekundaaristen onteloiden syntymisen, joita voi ilman Gelatamp-sientä muodostua verihyytymän supistuessa. Näihin onteloihin joutuessaan sylki voi aiheuttaa tulehduksia. Kalluksen muodostumista sieni ei häiritse. Haavan paranemishäiriöiltä voidaan suuremmissa leikkausonteloissa näin välttyä.

Gelatamp pysyy haavassa ja liukenee täysin neljässä viikossa. Hopeakolloidin lisääminen vaikuttaa antimikrobisesti ilman resistenssin muodostumista.

Hopeakolloidin lisäys vaikuttaa antiseptisesti ilman toksisuutta. Muista mahdollisista bakteerinvastaisista lisäaineista poiketen hopeakolloidia ei voi huuhdella tamponista, minkä vuoksi sillä on depot-vaikutus.

Gelatamp-sientä myydään gammasteriloituna.

Sisältää:

Gelatamp-gelatiinisieni (14 × 7 × 7 mm) sisältää:

Kovetettua gelatiinia Ph. Eur. 9,5 mg

Hopeakolloidia Ph. Eur. 0,5 mg

Käyttöaiheet:

Hammaskuoppien ja haavaonteloiden hoito, esim. ekstraktion, kystektomian, kystostomian, juurenkärjen poiston ja poskionteloperforaation jälkeen sekä kasvainten tai puhkeamattomien hampaiden kirurgisen poiston jälkeen.

Sekundaaristen onteloiden muodostumisen estäminen

Haavainfektion profilaksi

Jälkiverenvuodon profilaksi

Sidemateriaalina gingivektomian jälkeen

Hampaiden kiinnityskudoksen sairaudet

Käyttöohjeet:

Alumiinisinetin poistamisen jälkeen Gelatamp otetaan pakkauksesta aseptisissä olosuhteissa, ja se on välittömästi käyttövalmis. Tarvittaessa sienien koko sovitetaan haavaonteloon painamatta sitä kasaan. Jos kysymyksessä on suurempi haava, voidaan myös käyttää kahta Gelatamp-sientä.

Sieni laitetaan heti leikkauksen jälkeen kuivana ja kasaan painamattomana veriseen haavaonteloon, jossa sen annetaan imeä itsensä mahdollisimman täyteen verta (optinen kontrolli). Jotta toivottu epiteelin muodostus ei häiriinny, sieni ei saa ulottua sisäisen ienreunan yläpuolelle. Näin hammaskuoppa on hoidettu eikä sitä pidä enää huuhdella.

Steriliteetti:

Gelatamp toimitetaan gammasteriloituna. Vaurioitumattomien ja avaamattomien pakkausten steriiliys on taattu. Ennen käyttöä rikkoutuneet pakkaukset tulee heittää pois.

Vasta-aiheet:

Tulehtuneet, erittävät ja märkivät haavat, yliherkyys hopealle tai gelatiinille.

Sivuvaikutukset:

Paraneminen saattaa viivästyä epäasiallisessa käytössä, varsinkin jos hammaskuoppa ei ole puhdas.

Yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa:

Käytettäessä samanaikaisesti alveolaaritahnoja, haavakeiloja tai muita täytteitä, tai käytettäessä nestemäisiä aineita tai lääkkeitä, kuten anioniaktiivisia tensiidejä, fenolipitoisia antiseptisiä aineita, etakridiiniilaktaattia, ohennettuja mineeralisia happeja ja konsentroituja suolaliuoksia kosteuttamiseen, haavan paraneminen saattaa estyä, minkä vuoksi niitä olisi syytä olla käyttämättä. Vältettävä kosketusta vetyperoksidin kanssa, koska sienestä lähtee tällöin väri.

Säilytysohjeet:

Gelatamp on kosteutta imevä. Sen takia pakkaus tulee heti käytön jälkeen sulkea ja säilyttää kuivana ja valolta suojassa.

Lääketuotteet on pidettävä pois lasten ulottuvilta.

Gelatamp säilyy kolme vuotta. Avaamattomana sitä voi käyttää viimeiseen käyttöpäivään saakka. Käytettävä neljän viikon kuluessa avaamisesta. Tuotetta ei saa käyttää pakkaukseen ja etikettiin merkityn päivämäärän jälkeen.

Käyttämättömät sienet voidaan hävittää muun laboratoriojätteen mukana. Muovipakkaus, kannet ja alumiinifolio jne. voidaan panna kierrätettäviin jätteisiin.

Pakkauksen koko:

20 sientä REF 274002

50 sientä REF 274007

Julkaisupäivämäärä:

12-2015