



Biologisten indikaattoreiden (EZ-itiöampullit PD tuotekoodi 62609) käyttö ja inkubointi

Autoklaavin (mukaanlukien DAC) testaus EZ-itiöampulleilla suoritetaan kolmen kuukauden välein (Ohje suun terveydenhuollon yksiköiden tartunnantorjuntaan /THL 22/2016) sekä huollon yhteydessä tai mikäli muiden testien (BowieDick, indikaattoriliuskat) tuloksissa esiintyy poikkeamaa.

Käyttöohje

- Numeroi indikaattorit (kolme kpl) juoksevasti. Kirjoita numero ampullin etikettiin, älä ruskeaan korkkiin. Kirjaa testauslomakkeeseen, mihin kohtaan autoklaavia sijoitat kunkin ampullin. Merkitse lomakkeeseen autoklaavin numero sekä sterilointipäivä. Kirjaa lomakkeeseen käytettävien ampullien eränumero (LOT) ja viimeinen käyttöpäivä (EXP). Kaikkien ampullien tulee olla samasta eränumerosta.
- Aseta ampullit steriloitavien tuotteiden joukkoon, steriloinnin kannalta kriittisimpiin kohtiin:
 - 1.alimmalle hyllylle välittömästi oven läheisyyteen
 - 2.alimmalle hyllylle takaseinän läheisyyteen
 - 3.alimmalle hyllylle lähelle pohjasuodatinta. Älä laita indikaattoreita kiinni seiniin.
- Suorita sterilointi. Ampullin etiketissä oleva sininen raita muuttuu steriloitaessa ruskeaksi / mustaksi.
- Anna kapseleiden jäähtyä vähintään 10 min.
- Suorita viljely inkubaattorissa tai lähetä indikaattorit Plandentin huoltoon tai Kaikolle viljeltäväksi. HUOM! muista lähettää autoklavoitujen indikaattoreiden lisäksi steriloimaton kontrolliampulli samasta erästä (LOT:sta). Älä avaa tai riko kapselia.

Käyttö DAC:ssa

- Aseta indikaattori DAC Universal kammion pohjalle, suurin piirtein keskikohtaan, joka on kammion kylmin paikka steriloinnin aikana. Tai aseta indikaattori sille tarkoitettuun klipsiin (PD tuotekoodi 31628) ja aseta klipsi kanteen merkitylle aluelle tai aseta indikaattori itiö/ PCD-testerin sisään (PD tuotekoodi MD122783).
- Käytä laite normaalin puhdistuksen, voitelun ja sterilointivaiheen läpi. Anna kammion jäähtyä. Poista biologinen indikaattori kammioista ja lähetä testattavaksi.



itiöampullikiinnike



indikaattorin asettaminen itiö/PCD-testeri



Viljelypalvelu:

Plandent huolto => lähetä ampullit Plandentin huoltokuoressa tai pehmustetussa kirjekuoressa. Huoltokuoria saat maksutta tarveainemyyjältäsi. Kirjoita kuoren päälle, että se sisältää itiöampulleja, jolloin huoltomme ottaa asian heti työlistalle. Liitä mukaan viljelylomake (ks.liite).

Testaus maksaa 18€ alv.0%/ autoklaavi/ testaus. Vastaus lähetetään sähköpostilla tai kirjeenä.

Varastointi

Ampullit säilytetään huoneenlämmössä.

Säilyvyys 2 vuotta valmistuspäivästä.

www.plandent.fi

puh. 020 368680

myynti@plandent.com

