

Tuotetiedot

FD 333 top wipes -pikadesinfiointipyyhkeet



FD 333 top wipes yhdellä silmäyksellä

- Kätevät desinfiointipyyhkeet invasiivisten ja ei-invasiivisten lääkinnällisten laitteiden ja lääketieteellisten kalusteiden alkoholia kestävien pintojen pikadesinfiointiin vastaanotoilla, laboratorioissa ja sairaaloissa.
- Vaikutusaika VAH:n mukaan 1 minuutti, Tb-bakteerit mukaan lukien.
- Rajoitetusti virusidinen PLUS (vaipalliset virukset ml. HBV, HCV, HIV, koronavirukset sekä vaipattomat adeno- ja norovirukset).
- FD 333 top wipes -pyyhkeiden vaikuttavan aineen liuos FD 333 on testattu ajankohtaisten VAH-menetelmien ja eurooppalaisten standardien mukaan.
- FD 333 on VAH-listassa, desinfiointiaineiden IHO-listassa.
- Testattu standardien EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 ja EN 16615 mukaan sekä 4-kenttätestissä VAH/EN 16615:n mukaan.
- Hyvä yhteensopivuus materiaalien kanssa.
- Hajusteeton.
- Kuivuu nopeasti jälkiä jättämättä.
- Pyyhkeiden koko: noin 175 x 250 mm.

Ominaisuudet

Dürr System-Hygienen FD 333 top wipes on aldehyditon, alkoholi-pitoinen käyttövalmis desinfiointipyyhe invasiivisten ja ei-invasiivisten lääkinnällisten tuotteiden ja lääketieteellisten kalusteiden alkoholia kestävien pintojen pikadesinfiointiin vastaanotoilla, laboratorioissa ja sairaaloissa. FD 333 top wipes -desinfiointipyyhkeille on ominaista nopea vaikutus ja hyvä yhteensopivuus materiaalien kanssa. Desinfioidut pinnat kuivuvat nopeasti.

Koostumus

FD 333 top wipes -desinfiointipyyhkeet sisältävät FD 333 -ainetta. FD 333 -desinfiointiaineen vaikutus perustuu alkoholin ja kvaternääristen ammoniumyhdisteiden yhdistelmään. 100 g vaikuttavan aineen liuosta sisältää 62 g etanolia, 0,05 g didekyyli-dimetyyli-ammoniumkloridia, apuaineita ja vettä.

Mikrobiologinen teho

FD 333 top wipes -desinfiointipyyhkeet vaikuttavat bakterisidisesti¹⁾, tuberkulosidisesti¹⁾, fungisidisesti¹⁾, rajoitetusti virusidisesti PLUS (vaipalliset virukset ml. HBV, HCV ja HIV^{2), 3)} sekä vaipattomat adeno-¹⁾ ja norovirukset^{1), 4)}. FD 333 on VAH-listassa, desinfiointiaineiden IHO-listassa. Vaikuttavan aineen liuos on testattu EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 16615 mukaan. FD 333 top wipes -pyyhkeet on testattu käyttövalmiina pyyhkeinä 4-kenttätestissä VAH:n ja EN 16615:n mukaan.

Käyttö

Ota FD 333 top wipes -desinfiointipyyhkeet yksitellen säiliöstä. Pyyhi desinfioitavat pinnat ja esineet ja anna valmisteeseen vaikuttaa. Desinfioi pinnat, joilla on näkyvää likaa, FD 333 top wipes -liinalla, ja poista lika liinalla. Desinfioi puhdistetut pinnat vielä kertaalleen. Varmista, että ainetta on käytetty koko alueella ja että vaikutusaika on noudatettu. Sulje Flowpack välittömästi sen jälkeen, kun sieltä on otettu liina. Vaikutusaika on VAH:n mukaan 1 minuutti, homesienille 5 minuuttia.

Ympäristövaikutukset

Pakkauksen materiaalin voi lämpökierrättää. Hävitä käytetyt pyyhkeet talousjätteen seassa. Älä heitä WC:hen.

Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteista.

Tuotetiedot

FD 333 top wipes -pikadesinfiointipyyhkeet

Fysikaaliset ominaisuudet

Vaikuttavan aineen liuos:

Ulkonäkö: kirkas, väritön liuos

Tiheys: $D = 0,88 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$ (20 °C)

Leimahduspiste: 22 °C (DIN 51755)

Säilyvyys

3 vuotta

Avatun tuotteen säilyvyys 1 kuukausi, kuitenkin enintään viimeisen käyttöpäivämäärään saakka (asianmukaisesti säilytettynä).

Pakkauskoost

Flowpack, sis. 50 pyyhettä

4 x 50 pyyhettä pakkauksessa

Säilytys

Säilytä valmistetta vähintään 5 °C:n ja enintään huoneen lämpötilassa.

Yleisiä ohjeita

Desinfioi lääkinnällisten laitteiden kuten suunsisäisten kameroiden, turbiinien sekä käsi- ja kulmakappaleiden ulkopinnat ennen uudeleenkäsittelyä valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Varotta-va käytettäessä alkoholille herkkien materiaalien (esim. akryylilasi jne.) kanssa. Testaa aineen yhteensopivuus herkkien materiaalien kanssa huomaamattomassa paikassa. Katso palo- ja räjähdysturvallisuutta koskevat ohjeet, DGUV 107-002/BGR 206. Tuotteen värin ja hajun muutokset ovat mahdollisia erityisesti säilytettäessä tuotetta auringonvalossa. Näillä väri- ja hajumuutoksilla ei kuitenkaan ole vaikutusta tuotteen desinfiointitehoon. Vain ammattikäyttöön. Kaikista tämän tuotteen yhteydessä ilmenevistä vakavista tapahtumista on viipymättä ilmoitettava valmistajalle ja jäsenmaan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Varoitukset

FD 333 top wipes on luokiteltu ja merkitty CLP-määräyksen mukaisesti: katso tuotemerkinnät ja käyttöturvallisuustiedote.

Myynti

Dürr Dental SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Valmistaja

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Germany
www.orochemie.de
info@orochemie.de

Käyttö	Vaikutusaika
Pintadesinfiointi (VAH-menetelmät) ¹⁾	1 min.
Bakteerit ¹⁾ ja hiivasienet ¹⁾	1 min.
Tb-bakteerit ¹⁾	1 min.
Homesienet ¹⁾	5 min.
Vaipalliset virukset ml. HBV, HCV, HIV, koronavirukset ^{2), 3)}	1 min.
Adenovirukset ¹⁾	1 min.
Norovirukset ^{1), 4)}	1 min.

1) Vaikuttavan aineen liuos on testattu vähäisessä kuormituksessa (VAH, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 16615, EN 14476).

2) Testattu adeno- ja MNV-viruksella (EN 14476) ml. vaipalliset virukset kuten HBV, HCV, HIV.

3) RKI-lausunnon mukaisesti (Bundesgesundheitsbl. 60, 353-363, 2017).

4) Testattu suuressa kuormituksessa (EN 14476).

Riippumattomat lausunnot – omat tutkimukset

Lausunnot ovat saatavilla pyynnöstä.

CE 0124