

FD 366 sensitive wipes

Herkkien pintojen desinfiointi



FD 366 sensitive wipes -desinfiointipyyhkeet sopivat lääkintälaitteiden kuten hoitolaitteiden muoviosien ja tekonahkapäällisten, akryylilasin, polymerointilamppujen, laitesuojusten, sekoitusastioiden (myös tyhjiösekoituslaitteiden), letkutelineiden, suunhuuhtelualtaiden, hoitolaitteiden näppäinten tai XR-röntgenfilmin kehityslaitteiden, turbiinien sekä käsi- ja kulmakappaleiden nopeaan desinfiointiin ja puhdistukseen ennen niiden käsittelyä valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. FD 366 sensitive wipes ovat erittäin yhteensopivia eri materiaalien kanssa. Desinfioidut pinnat kuivuvat nopeasti.

Koostumus: 100 g vaikuttavan aineen liuosta sisältää 17 g 1-propanolia, 0,25 g alkyyli-bentsyylidimetyyli- ammoniumkloridia 50 %, apuaineita ja vettä.

Vaikutusalue: Bakteerit, tuberkuloosibakteerit, hiivasieniä tuhoava, rajoitetusti virukset (vaipalliset virukset kuten Vaccinia-virukset ml. HBV, HCV ja HIV¹⁾, sekä vaipattomat virukset kuten Noro-virukset). VAH-lista. Testattu standardien EN 14348, EN 14476, EN 16615 mukaan.

¹⁾ RKI-suosituksen mukaan (Bundesgesundheitsbl. 47, 62–66, 2004).

Käyttö: Ota FD 366 sensitive wipes -desinfiointipyyhkeet yksitellen säiliöstä, hankaa desinfioitavia pintoja ja esineitä ja anna valmiin vaikuttaa. Vaikutusaika VAH:n mukaisesti 1 minuutti (katso taulukko kohdassa „DE“). Katso lisätietoja Internetissä olevista tuoteselosteista.

Huomautus: Turbiinien sekä käsi- ja kulmakappaleiden ulkopinnat on desinfioitava valmistajan antamien määräysten mukaisesti ennen määrättyä uudelleenkäsittelyä. Testaa aineen yhteensopivuus herkkien materiaalien kanssa huomaamattomassa paikassa.

Varoitus. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Käytä suojakäsineitä silmiensuojainta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. Hävitä sisältö/pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

CE 0297